

Contact

Neem voor vragen contact op met de klantenservice van EchoNous®:

Telefoon 1-844-854-0800

Fax 425-242-5553

E-mail info@echonous.com

Website echonous.com

⚠ **Let op:** Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

Opmerking: Niet alle functies zijn op elke markt beschikbaar. Raadpleeg voorafgaand aan gebruik de gebruikershandleiding voor uw regio of land voor alle beschikbare functies.



Snelstartgids

Inhoud van de verpakking

Bridge



Kosmos Bridge




Voedingsbron

Lexsa



Kosmos Lexsa

Torso/ Torso-One

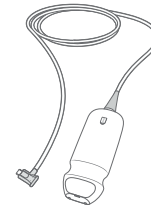


Kosmos Torso



Kosmos Torso-One

Torso Accessoires

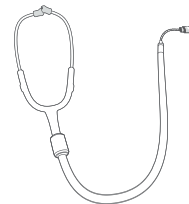


Binaurale headset



ECG-patiëntkabel


De Bridge opladen

Sluit het ene uiteinde van het netsnoer op de USB-ingang op de Kosmos Bridge en het andere uiteinde op een stopcontact aan om de Kosmos op te laden.

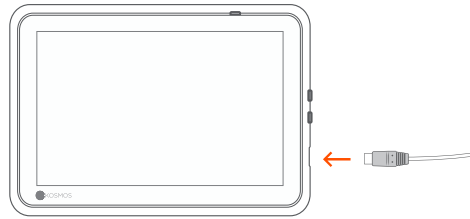


De Torso/Torso-One aansluiten

Sluit de connector van de Kosmos Torso of Kosmos Torso-One op de aansluiting onder de handgreep van de Kosmos Bridge aan.

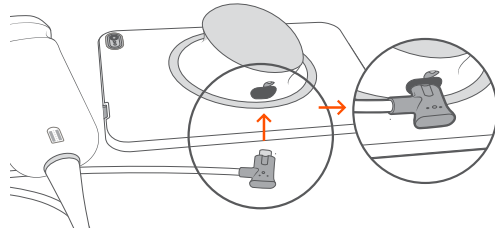


Lexsa aansluiten

Sluit de connector van de Kosmos Lexsa op de USB-ingang op de Kosmos Bridge aan.

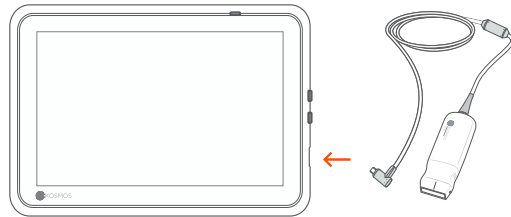

De Kosmos inschakelen


Druk op de aan/uit-knop om de Kosmos Bridge in te schakelen.

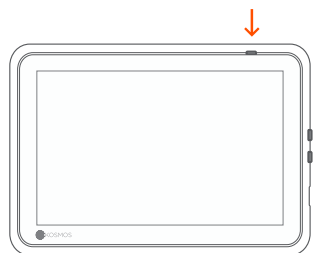

Montagestandaard (optioneel)


Plaats de Bridge in de standaard en sluit de sonde(s) aan.

Pas de positie zodanig aan dat u het scherm goed kunt zien en plaats hem op een vlakke ondergrond.

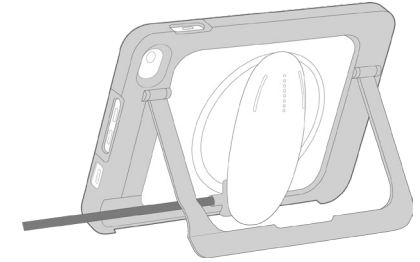


ECG (Alleen van toepassing voor Torso)


Sluit het magnetische uiteinde van de connector van de ECG-patiëntkabel op de Kosmos Torso aan om het ECG-signaal weer te geven.

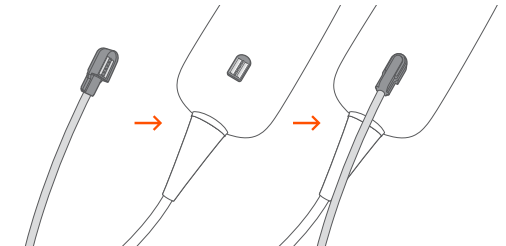

Digitale auscultatie (Alleen van toepassing voor Torso)

Sluit het USB-uiteinde van de Kosmos binaurale headset op de USB-ingang op de Kosmos Bridge aan om het geluid van de digitale auscultatie te beluisteren.

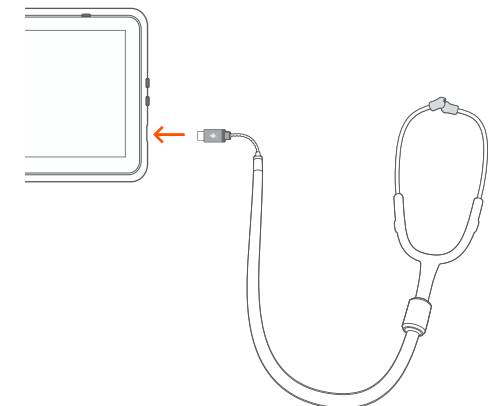

 Raadpleeg de gids voor de gebruikersinterface van de Kosmos voor de volgende stappen.