

Guía rápida de PW/CW

Modo B



Modo de PW



- A** Modo de PW
- B** Modo de TDI
- C** Modo de CW

- 1** Mueva el círculo para colocar la ventana en la ubicación deseada.
- 2** Pulse Update (Actualización).

Tanto el modo de PW como el de CW están disponibles con o sin modo de color.
Ajuste el volumen para oír señales de PW y CW.

Doppler en vivo frente a B en vivo



- 1** Indicador y botón de conmutación para cambiar entre B en vivo y Doppler en vivo.
- 2** Arrastre hacia arriba o abajo para mover la línea de referencia.

- 3** Pantalla de B en vivo.

Modo de CW



De forma similar puede adquirir la señal de CW pulsando el botón de modo de CW.

- No olvide ajustar el punto focal para obtener la forma de onda óptima.

Mediciones y anotaciones cardíacas



Cálculos cardíacos

Los cálculos cardíacos de Kosmos le permiten evaluar la mayoría de las lesiones valvulares y cuantificar el tamaño y la función de las cámaras ventriculares:

- 1 Cálculos cardíacos
- 2 Anotaciones
- 3 Mediciones claras
- 4 Ver informe de mediciones

Nota: No todas las funciones están disponibles en todos los mercados. Consulte la guía del usuario de su región o país para ver todas las funciones disponibles antes del uso.

⚠ **Precaución:** La ley federal (Estados Unidos) establece que la venta de este dispositivo solamente puede ser realizada por un médico o bajo prescripción médica.



Anotaciones

Las anotaciones le permiten al usuario marcar y etiquetar imágenes cuando están congeladas y en la revisión de exámenes. También le permiten al usuario realizar mediciones genéricas que no se guardarán en el informe.