

PW/CW Hızlı Kılavuz

B Modu



A PW modu

B CW modu

Hem PW hem de CW modu, Renkli modu ile veya Renkli modu olmadan kullanılabilir.

PW ve CW sinyallerini duymak için ses düzeyini ayarlayın.

PW Modu



1 Geçidi veya çizgiyi istenen konuma yerleştirmek için daireyi taşıyın.

2 Update (Güncelle) düğmesine dokunun

Doppler Canlı - B Canlı



1 B canlı ve Doppler canlı arasında geçiş yapmak için geçiş düğmesi ve gösterge

2 Başlangıç çizgisini taşımak için yukarı veya aşağı sürükleyin



3 B canlı tarama

CW Modu



Benzer şekilde, CW modu düğmesine dokunarak CW sinyali alabilirsiniz.

- Optimum dalga formu elde etmek için odak noktasını ayarlamayı unutmayın.

Doppler Ölçümleri



Metin ve belirteç açıklamalarına ek olarak, dondurulmuş durumda aşağıdaki Doppler ölçümleri mevcuttur:

- 1 PHT (Basınç Yarılanma Zamanı)
- 2 Hız ve PG (Basınç Gradyanı)
- 3 VTI (Hız Zaman İntegrali)

Not: Tüm özellikler bazı pazarlarda mevcut değildir. Kullanımdan önce mevcut olan tüm özellikler için bölgenizdeki veya ülkenizdeki kullanım kılavuzunu referans alın.

⚠ **Dikkat:** Federal yasa (ABD), bu cihazın yalnızca bir doktora veya bir doktorun siparişiyle satışına izin verir.



VTI

- VTI, piki otomatik olarak izler. Farklı bir pik seçmek için başka bir pike iki kez dokununuz.
- Ayrıca, kontrol noktalarından herhangi birini hareket ettirerek VTI izini düzenleyebilirsiniz.

İpucu: Bir kontrol noktası seçildiğinde, seçilen noktanın parmağınızın altında gizlenmemesi için parmağınızı ekranda başka bir yere götürünüz.