

Kimyasal Uyumluluk

Burada listelenen temizlik ve dezenfeksiyon kimyasalları, cihaz malzemeleriyle uyumluluk açısından değerlendirilmiştir. Başka temizlik ve dezenfeksiyon kimyasallarını cihazla uyumluluk açısından değerlendirdiğinizde aşağıdaki tabloyu güncellemeye devam edeceğiz.

Tüm temizlik ve dezenfeksiyon bilgileri için Kullanım Kılavuzuna bakın.

Temizlik ve/veya Dezenfeksiyon Maddesi	Etkin Madde	Kosmos Bridge	Kosmos Problemleri	EKG Kabloları	Kulaklık
Ilık Sabunlu su	Yok	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus Antiseptik Tek Kullanımlık Mendiller	n-Alkil dimetil etilbenzil amonyum klorür (%0,125), n-Alkil dimetil Benzil Amonyum Klorür (%0,125), İzopropanol (%10-20), 2-Bütoksietanol (<%5)	A	A	A	A
1PDI Healthcare Super Sani-Cloth® Antiseptik Tek Kullanımlık Mendiller	n-Alkil dimetil etilbenzil amonyum klorür (%0,25), n-Alkil dimetil Benzil Amonyum Klorür (%0,25), İzopropil Alkol (İzopropanol) (%55,5)	A	A	A	A
1PDI Healthcare Sani-Cloth® Ağartıcı Antiseptik Tek Kullanımlık Mendiller	Sodyum Hipoklorit (%0,63)	A	A	C	B
2Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Diizobütilfenoksietoksietil dimetilbenzil amonyum klorür (%0,28), İzopropanol (%17,2)	A	A	A	A
1Metrex CaviCide™	Diizobütilfenoksietoksietil dimetilbenzil amonyum klorür (%0,28), İzopropanol (%17,2)	A	A	A	A
1Metrex CaviWipes1™	Didesil dimetilamonyum Klorür (%0,76), Etanol (%7,50), İzopropanol (%15)	A	A	A	A
1Metrex CaviCide1™	Didesil dimetilamonyum Klorür (%0,76), Etanol (%7,50), İzopropanol (%15)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	Orto-ftalaldehit (%0,55), Dipotasyum Hidrojen fosfat, Potasyum Dihidrojen Fosfat, Benzotriazol, sitrik asit, D ve C yeşil boyalar #5, N-(Hidroksietil)-etilendiamin triasetik asit (HEDTA) (%99,45)	Geçerli Değil	A	Geçerli Değil	Geçerli Değil
ASP Enzol® Enzimatik Deterjan	Subtilizin (<%5)	A	A	A	A
Hidrojen Peroksit %3 solüsyon	Hidrojen Peroksit (%3), su (%97)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Sodyum Hipoklorit (%1,1)	A	A	C	B

Açıklama:

¹ Liste Ndeki Ürünler: SARS-CoV-2'ye Karşı Kullanılan Dezenfektanlar

² Metrex sürüm notu uyarınca Covid 19 için onaylanmıştır

A: Uyumlu

B: Dikkat - Önerilmez.

Uzun süreli kullanımda küçük kozmetik değişikliklere neden olabilir.

C: Uyumlu değil -

Kullanmayın. Uzun süreli maruziyet, ürün hasarına neden olabilir.

Geçerli Değil:

Uyumluluk verileri mevcut değildir

Not: Tüm özellikler bazı pazarlarda mevcut değildir. Mevcut olan tüm özellikler için bölgenizdeki veya ülkenizdeki kullanım kılavuzunu referans alın. Kullanmadan önce kullanım kılavuzuna bakın. **⚠ Dikkat:** Federal yasa (ABD), bu cihazın yalnızca bir doktora veya bir doktorun siparişiyle satışına izin verir.