

Kontak

Dukungan Pelanggan

Telepon 1-844-854-0800
Email support@echonous.com

△ **Perhatian:** Undang-undang federal (Amerika Serikat) menyatakan bahwa perangkat ini hanya boleh dijual oleh atau atas pesanan dokter.

Catatan: Tidak semua fitur tersedia di semua negara. Baca panduan pengguna yang berlaku di wilayah atau negara Anda untuk mengetahui semua fitur yang tersedia sebelum menggunakan.



P007143-002A

Produk dari EchoNouS

Hanya untuk AS *Kosmos Trio adalah sistem pelabelan, pemeringkatan, dan panduan citra otomatis dalam waktu nyata yang memfasilitasi perolehan citra oleh praktisi kesehatan. Alur Kerja EF Berbantuan AI menggunakan AI untuk melakukan perhitungan EF awal oleh praktisi kesehatan. Kosmos AI FAST menggunakan algoritme AI untuk mendeteksi dan menampilkan pelabelan struktur anatomi dalam waktu nyata. Kosmos Trio, Alur Kerja EF Berbantuan AI, dan Kosmos AI FAST dirancang untuk digunakan oleh tenaga kesehatan profesional berkualifikasi atau orang yang berada dalam pengawasan atau bimbingan langsung dari tenaga kesehatan profesional yang terlatih atau berlisensi. Kosmos Trio, Alur Kerja EF Berbantuan AI, dan Kosmos AI FAST memenuhi kebutuhan analisis citra yang mendesak selama penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19. Kosmos Trio, Alur Kerja EF Berbantuan AI, dan Kosmos AI FAST belum mendapat persetujuan FDA.



Panduan Cepat


Kosmos Torso-One

Layar Beranda

- 1 Alur kerja EF Berbantuan AI*
- 2 Pencitraan
(Heart [Jantung], Lung [Paru-Paru],
dan Abdomen [Perut])




Pencitraan

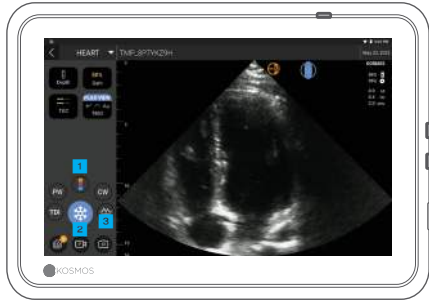

Mode B

- 1 Mode B+CD
- 2 Hentikan
- 3 Mode B+M

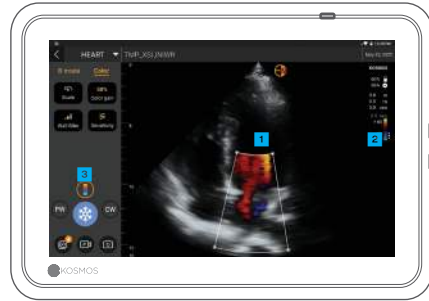


Mode B+CD

- 1 Kotak Warna
Seret untuk menggerakkan dan mengubah ukuran kotak
- 2 Pilih Color Map (Peta Warna)
- 3 Matikan Color Doppler (Doppler Warna)



Hentikan

- 1 Perhitungan
- 2 Anotasi
- 3 Jalankan

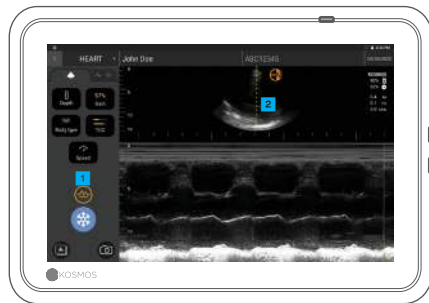

Mode B+M

- 1 Matikan M-mode (Mode M)
- 2 Garis M
Seret untuk menggerakkan

Kosmos AI



Kosmos Trio*


Pilih tampilan jantung dan aktifkan fitur Trio, antara lain:

- 1 Panduan Otomatis
- 2 Penilaian Otomatis
- 3 Pelabelan Otomatis
- 4 Penangkapan Otomatis



Kosmos AI FAST*

1 AI FAST memfasilitasi pelabelan anatomi secara otomatis dan identifikasi tampilan untuk Pemeriksaan FAST dalam waktu nyata.

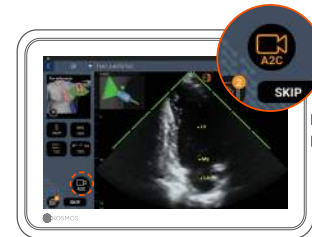

Alur kerja EF Berbantuan AI*

- 1 Hubungkan kabel EKG (opsional).
- 2 Dapatkan tampilan A4C yang baik, lalu ketuk A4C untuk mengambil klip. Ulangi untuk A2C.
- 3 Kosmos memilih bingkai ED dan ES, menggambar kontur LV yang sesuai, dan menghitung EF.
- 4 Klik gambar mini/tombol edit untuk mengedit.



Anda dapat mengedit sesuai kebutuhan:

- 5 Pilih bingkai ED/ES lain.
- 6 Sesuaikan kontur LV.