



Σύντομος Οδηγός


Kosmos Lexsa

Για χρήστες Bridge και Android

Αρχική οθόνη

1 Απεικόνιση (MSK, Nerve (Νεύρων), Vascular (Αγγειακή) και Lungs (Πνευμόνων))

2 Ασθενείς, Εξετάσεις, Ρυθμίσεις και Βίντεο με οδηγίες

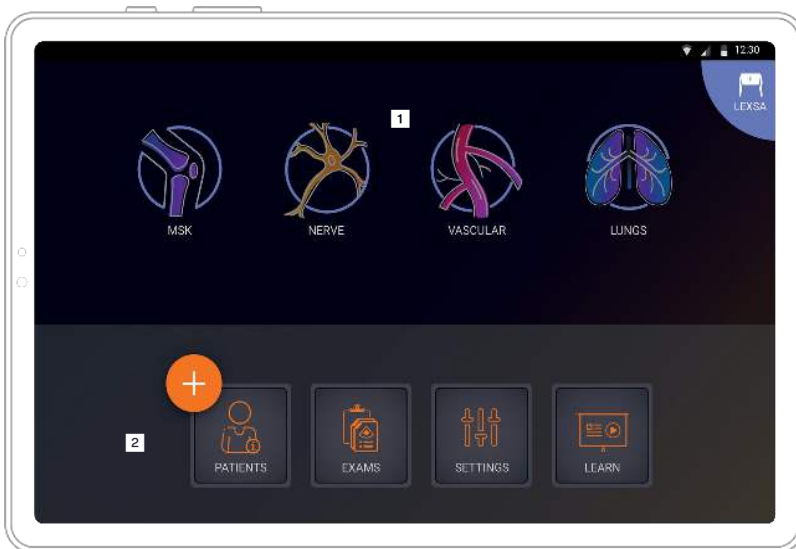

Σημείωση: Η εφαρμογή EchoNexus Kosmos Ultrasound είναι απαραίτητη για χρήστες Android.



App: EchoNexus Kosmos: Ultrasound App
EchoNexus, Inc.




Κάντε λήψη της εφαρμογής EchoNexus Kosmos Ultrasound από το Google Play Store.

Ξεκινήστε την εφαρμογή, συνδεθείτε σε έναν συμβατό αισθητήρα, και είστε έτοιμοι για σάρωση.


Απεικόνιση

Λειτουργία B-mode

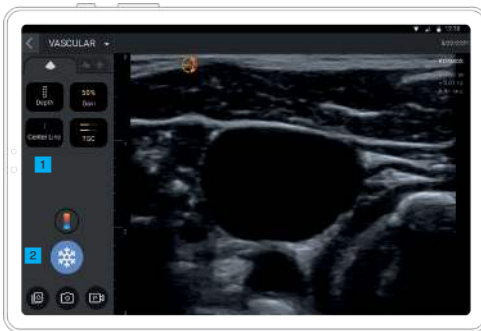

- 1 Κεντρική γραμμή
- 2 Πάγωμα

Λειτουργία M-mode

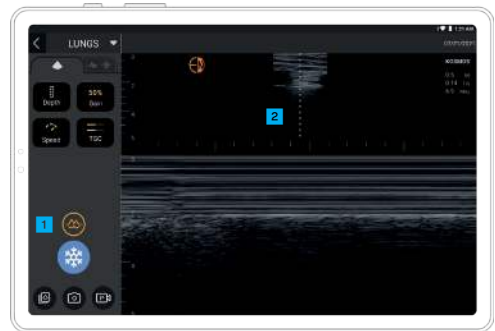


- 1 Η λειτουργία M-mode είναι διαθέσιμη μόνο με την προεπιλογή απεικόνισης Πνευμόνων
- 2 Γραμμή M

Έγχρωμο Doppler



- 1 Η λειτουργία χρώματος είναι διαθέσιμη μέσω των προεπιλογών MSK, Nerve (Νευρών) και Vascular (Αγγειακή)

Πάγωμα

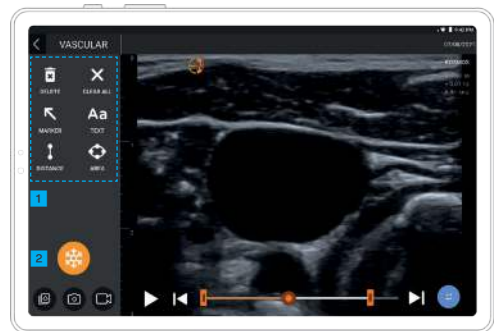

- 1 Σχόλια
- 2 Αναίρεση παγώματος

Επικοινωνία

Υποστήριξη πελατών

Τηλέφωνο 1-844-854-0800

Email support@echonous.com

⚠ **Προσοχή:** Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (Ηνωμένες Πολιτείες) περιορίζει αυτή τη συσκευή για πώληση μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Σημείωση: Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις αγορές. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για την περιοχή ή τη χώρα σας για να δείτε όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά πριν από τη χρήση.

Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.