




Guida rapida

# Kosmos Lexsa

Per utenti Bridge e Android

## Schermata iniziale

- 1 Imaging: MSK, Nerve (Nervo), Vascular (Vascolare) e Lungs (Polmoni)
- 2 Patients (Pazienti), Exams (Esami), Settings (Impostazioni) e Tutorial Videos (Video tutorial)

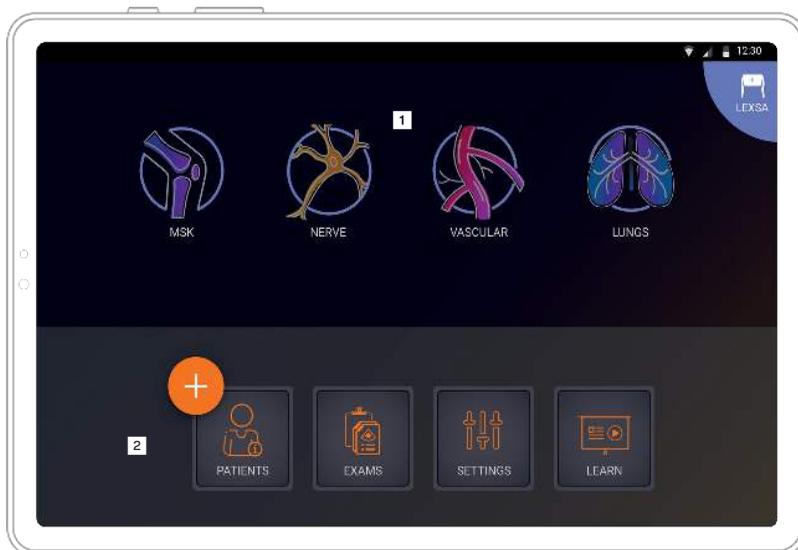

**Nota:** Per gli utenti Android è necessaria l'app Ultrasound EchoNous Kosmos.



App: EchoNous Kosmos: Ultrasound App  
EchoNous, Inc.




Scarica l'app EchoNous Kosmos: app Ultrasound da Google Play Store.

Avvia l'app, collegala a una sonda compatibile e potrai iniziare la scansione.


# Imaging

## Modalità B

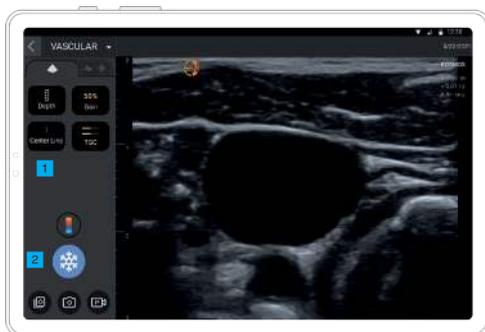


- 1 Linea centrale
- 2 Blocco

## Modalità M

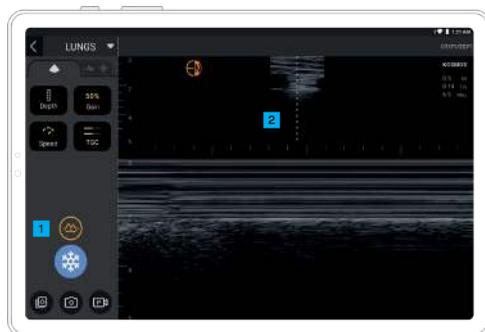


- 1 La modalità M è disponibile solo nell'impostazione predefinita Lungs (Polmoni)
- 2 Linea M

## Color Doppler

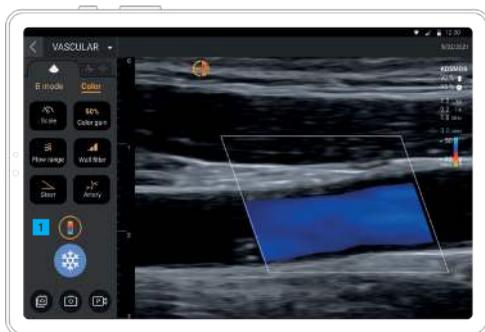

- 1 La modalità Colore è disponibile nelle impostazioni predefinite MSK, Nerve (Nervo) e Vascular (Vascolare).

## Blocco

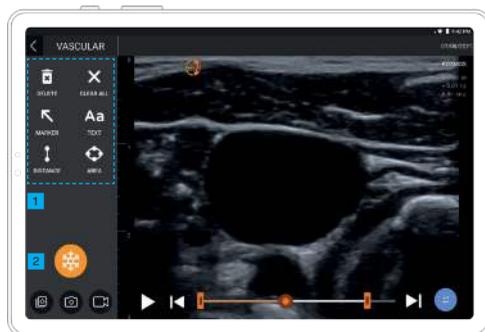

- 1 Annotazioni
- 2 Sblocco

# Contatti

## Assistenza clienti

Telefono 1-844-854-0800

E-mail [support@echonous.com](mailto:support@echonous.com)

⚠ **Attenzione:** la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo a medici o dietro prescrizione medica.

**Nota:** non tutte le funzioni sono disponibili in tutti i mercati. Fare riferimento alla guida per l'utente nella propria area geografica o nel proprio Paese per tutte le funzioni disponibili prima dell'uso.

Le funzionalità possono variare in base ai dispositivi.