

Guida per l'utente di AI Station 2

Introduzione

EchoNous offre prodotti accessori che consentono sessioni di scansione più lunghe, ricarica simultanea durante la scansione e portabilità collettiva per i tablet Kosmos e per tutte le sonde Kosmos.

EchoNous AI Station 2 è un supporto che consente di montare e rimuovere facilmente Kosmos Bridge, il tablet Android o il tablet iOS per un uso pratico e la portabilità. Inoltre, Kosmos Hub consente agli utenti di Kosmos Bridge e di Kosmos su iOS di eseguire contemporaneamente la scansione e la ricarica quando Lexsa è collegato, quando Torso o Torso-One sono collegati o quando sia Torso/Torso-One che Lexsa sono collegati.



Notare che Torso è disponibile solo per Kosmos Bridge.

Utilizzare questa guida insieme alla *Guida all'installazione di AI Station 2, supporto principale* incluso nella confezione di AI Station 2.

Fare riferimento alle istruzioni di installazione corrette in base al dispositivo Kosmos in uso.



Visitare il sito web all'indirizzo echonous.com/kosmos-resources per le versioni elettroniche delle guide per l'utente.



Visitare il sito web all'indirizzo echonous.com/product/kosmos-ultraportable-ultrasound per un elenco aggiornato dei tablet Android e iOS compatibili.


Installazione AI Station Core

Contenuto della confezione



- AI Station 2- Colonna
- AI Station 2- Base
- Contenitore di servizio
- (2) Clip cavo
- (4) Controdado 1/4-20
- (4) Rondella piatta da 1/4"


Installazione di AI Station 2 Core

 Notare che l'installazione di AI Station 2 può richiedere due persone.


1. Appoggiare la base e la colonna dell'AI Station 2 su un lato.
2. Allineare le viti sul fondo della colonna alle aperture della base. Collegare la base e la colonna.
3. Serrare la base e la colonna utilizzando i (4) controdadi e le (4) rondelle piatte in dotazione.

Torque to 75 inch/lbs (Coppia di serraggio a 75 pollici/libbre)

(4) Lock Nut (Controdado) 1/4-20
(4) Flat Washer (Rondella piatta) 1/4"

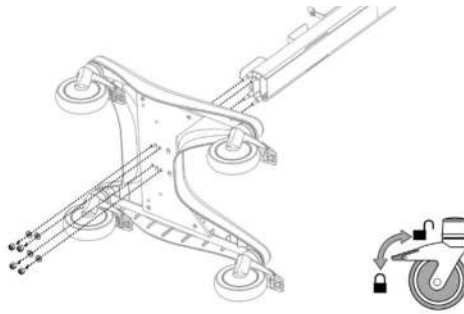

4. Una volta che la colonna e la base sono saldamente collegate, ruotare il supporto in verticale e far scorrere il contenitore di servizio in posizione.

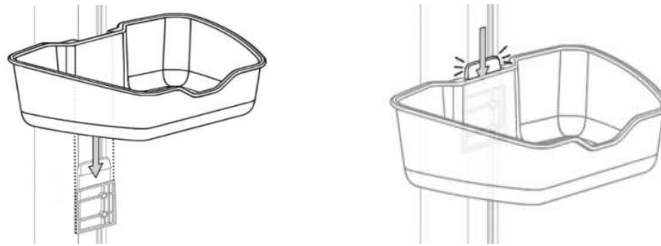


Installazione Kosmos Bridge




Installazione del supporto di Kosmos Bridge su AI Station

Contenuto della confezione

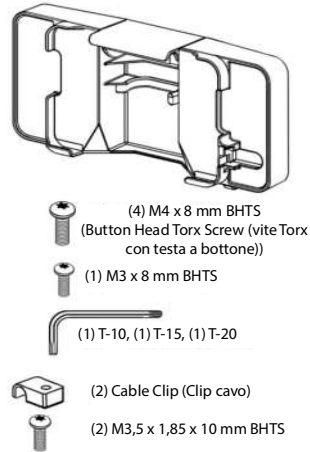

1. Utilizzando la chiave Torx T-20, fissare il supporto del tablet Bridge alla colonna dell'AI Station 2 utilizzando (4) viti Torx M4 x 8 mm con testa a bottone.

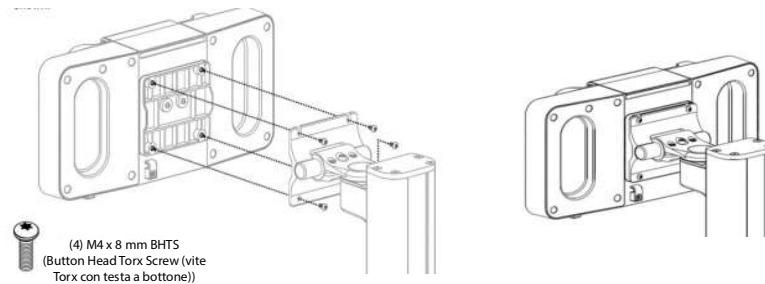


Installazione di Kosmos Bridge su AI Station




Assicurarsi che il fermo sia completamente chiuso in modo che Kosmos Bridge non cada e provochi lesioni o danni.

Per installare Kosmos Bridge su AI Station:

1. Allineare Kosmos Bridge in modo che il bordo inferiore poggi sulle linguette angolari del supporto per tablet.

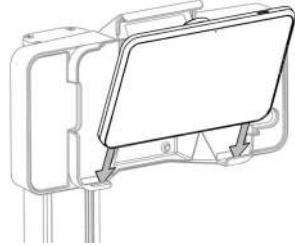

2. Accompagnare Kosmos Bridge all'indietro nel supporto per tablet e premerlo in posizione. Potrebbe essere avvertita una minore resistenza quando si preme l'impugnatura nell'alloggiamento.

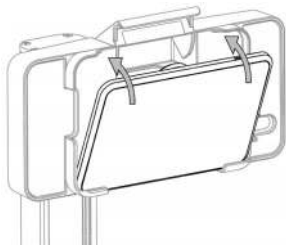



3. Premere sul fermo finché non scatta in posizione.



Rimozione di Kosmos Bridge da AI Station

Il pulsante di rilascio è stato volutamente nascosto per una maggiore sicurezza.


	Quando si rimuove Kosmos Bridge dal supporto, prima di premere il pulsante di rilascio regolare il supporto in modo che non si inclini verso il basso per evitare che cada a terra.
	<ul style="list-style-type: none">• Il pulsante di rilascio rilascia simultaneamente il fermo e il cavo USB.• Premere il pulsante di rilascio rapidamente e fino in fondo, al fine di assicurarsi che il cavo USB venga rilasciato correttamente.

Per rimuovere Kosmos Bridge da AI Station:

1. Assicurarsi che Kosmos Bridge sia rivolto in avanti e non inclinato verso il basso.
2. Sostenere Kosmos Bridge con una mano e utilizzare l'altra per premere il pulsante di rilascio rapidamente e fino in fondo sull'alloggiamento posteriore posto in alto a destra di AI Station.



3. Tenendo la parte superiore di Kosmos Bridge, inclinarlo in avanti e sollevarlo per rimuoverlo dal supporto.

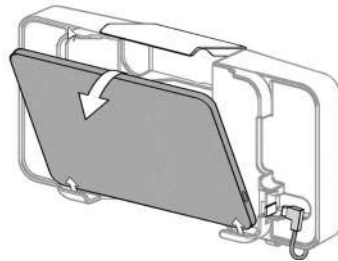


Bloccaggio del pulsante di rilascio (opzionale)

Se si desidera mantenere Kosmos Bridge fissato ad AI Station, è possibile bloccare il pulsante di rilascio per assicurarsi che il fermo non si apra.

Per bloccare il pulsante di rilascio:

- ★ Dopo aver installato Kosmos Bridge su AI Station, utilizzare una chiave T-10 Torx per posizionare la vite a testa tonda M3 x 8 mm BHTS sulla parte posteriore del supporto per tablet.

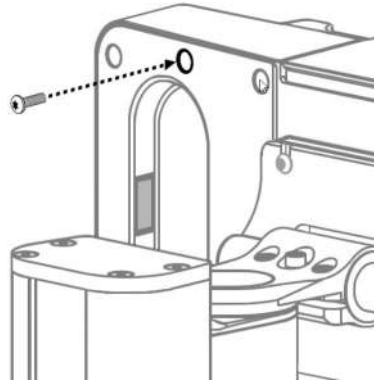


Regolazione della cerniera del tablet

È possibile regolare il supporto per tablet in modo che si inclini verso l'alto e verso il basso (+30/-15 gradi) e ruoti verso sinistra e verso destra (+/-90 gradi).




L'inclinazione verso il basso viene intenzionalmente limitata per ridurre la probabilità che Kosmos Bridge cada se il fermo viene aperto accidentalmente.





Se il supporto è troppo allentato o troppo stretto, è possibile regolarlo secondo quanto descritto nella *Guida all'installazione di AI Station 2, supporto per Kosmos Bridge*.

	Assicurarsi di sostenere il tablet mentre si regola la tensione. Infatti, in caso di tensione ridotta, il supporto per tablet potrebbe inclinarsi improvvisamente verso il basso.
---	---

Installazione e utilizzo di Kosmos Hub con Kosmos Bridge

	Notare che non tutte le funzioni sono disponibili in tutti i mercati. Prima dell'uso, fare riferimento alla guida per l'utente valida per la propria area geografica o per il proprio Paese per scoprire tutte le funzioni disponibili.
---	---


Mentre si utilizza Kosmos Bridge sull'AI Station, l'Hub Kosmos consente di eseguire contemporaneamente la scansione e la ricarica quando Lexsa è collegato, quando Torso o Torso-One sono collegati o quando sia Torso/Torso-One che Lexsa sono collegati. Di seguito sono riportate le istruzioni su come configurare Kosmos Hub con Kosmos Bridge.

	Durante la scansione con la sonda Lexsa, non scollegare l'alimentazione CA (se attiva).
	Prima dell'uso, Kosmos Hub deve essere collegato e fissato a Kosmos AI Station.
	Il box di alloggiamento dell'Hub non deve essere aperto quando si trova nell'ambiente del paziente.
	Kosmos Hub è attualmente disponibile per Kosmos Bridge e Kosmos su iOS.

Fissare il box di alloggiamento dell'Hub all'AI Station


1. Fissare il box di alloggiamento dell'Hub, senza l'Hub, all'AI Station con le singole viti a brugola.

-
-
- a. Alla base dell'AI Station, inserire il box di alloggiamento dell'Hub attraverso l'apertura
 - b. Far scorrere l'Hub sul dorso dello stativo.

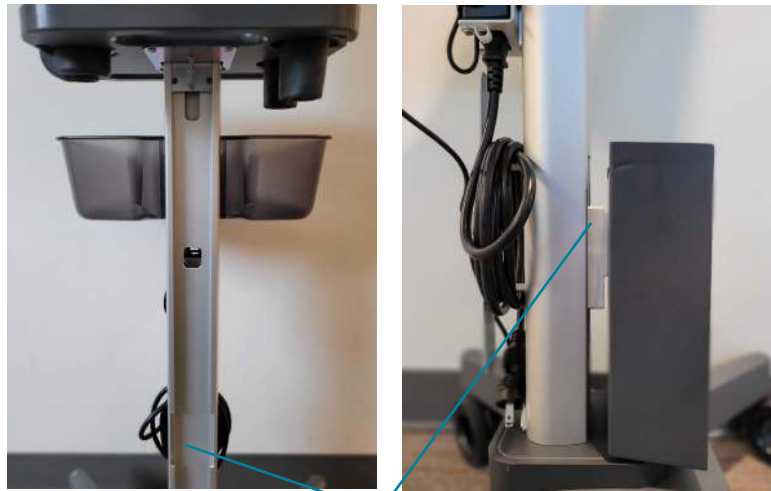

a. Apertura per il supporto del box di alloggiamento dell'Hub

- c. Nella posizione mostrata nell'immagine sottostante, utilizzare la chiave a brugola in dotazione e la singola vite a brugola per fissare l'Hub all'AI Station.

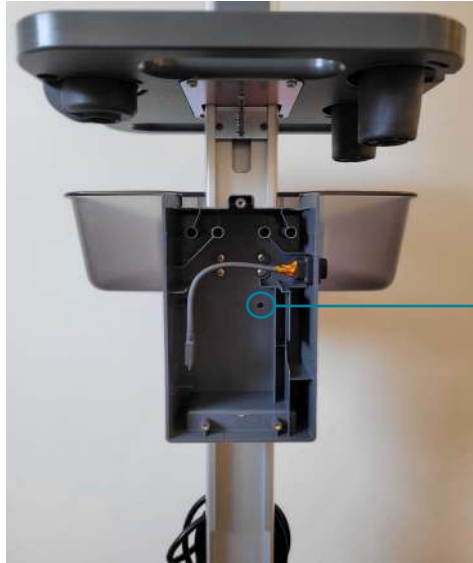


c. Inserire la vite a brugola e serrare con la chiave a brugola fino a bloccare il box di alloggiamento dell'Hub

Collegamento dell'Hub - Vedere l'immagine seguente

2. Prima di inserire l'Hub nel box di alloggiamento dell'Hub, collegare un'estremità del cavo USB-C da Bridge a Hub alla porta USB-C dell'Hub.
3. Posizionare l'Hub nel box di alloggiamento dell'Hub. Far passare il cavo USB-C da Bridge a Hub attraverso i raccordi e l'apertura per i cavi del box di alloggiamento dell'Hub.
4. Collegare il cavo di alimentazione dell'Hub alla porta di alimentazione dell'Hub.
5. Far passare il cavo di alimentazione dell'Hub attraverso i raccordi e l'apertura per i cavi del box di alloggiamento dell'Hub.
 - a. Suggerimento: utilizzare lo spazio dietro l'Hub per regolare il cavo attraverso i raccordi.
6. Collegare il cavo di prolunga (USB-C) alle porte USB-C dell'Hub.


7. Quando si esegue la scansione con Kosmos Lexsa, collegare Lexsa a una delle due porte esterne sul lato del box di alloggiamento dell'Hub.

Quando si esegue la scansione con Torso/Torso-One, collegare Torso/Torso-One a Kosmos Bridge (porta sotto l'impugnatura di Bridge).

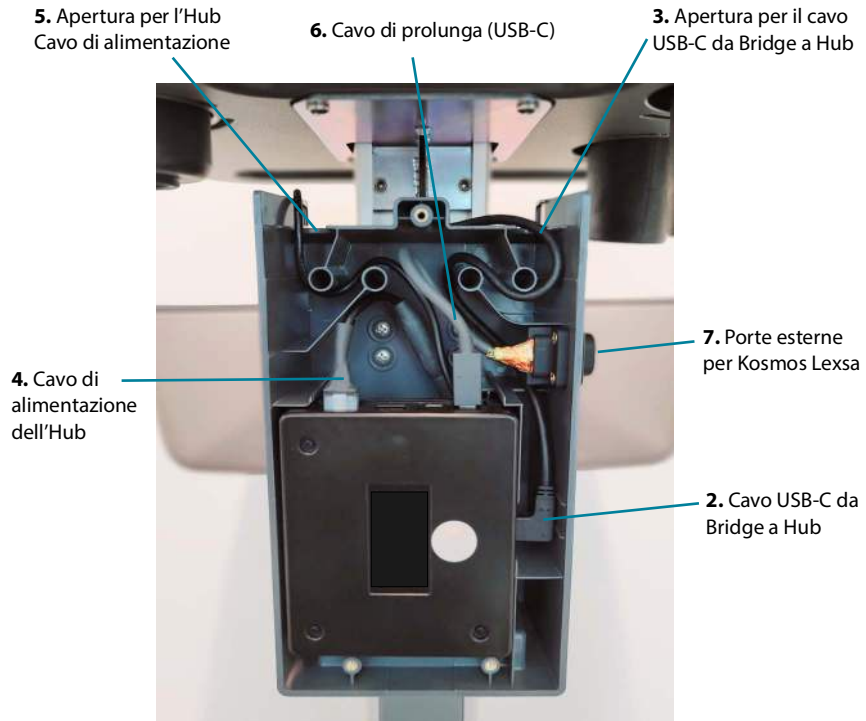

Collegamento dell'Hub al dispositivo Kosmos e all'alimentatore


8. Far passare l'estremità libera del cavo USB-C da Bridge a Hub attraverso il Core dell'AI Station e fino al supporto del Bridge.

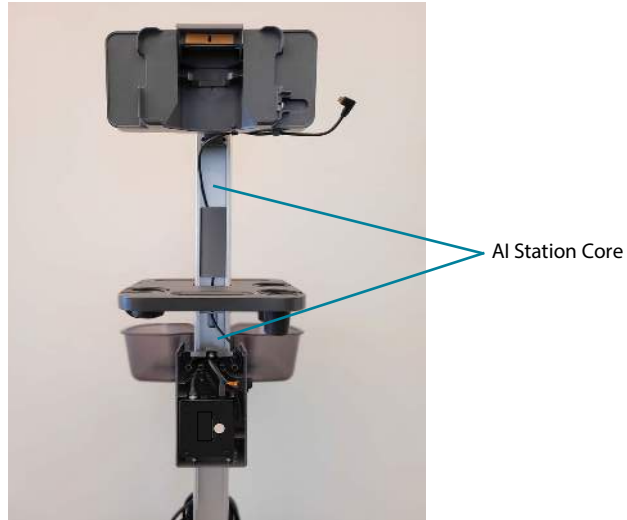

9. Inserire Bridge nell'apposito supporto e collegare il cavo USB-C da Bridge a Hub alla porta laterale del Bridge.



10. Collegare i fermacavi al supporto per tablet Bridge. Far passare il cavo USB-C da Bridge a Hub attraverso i fermi per cavi e serrare i fermi per cavi al supporto utilizzando le (2) viti M3,5 x 1,65 x 10 mm BHTS e T-15 Torx.

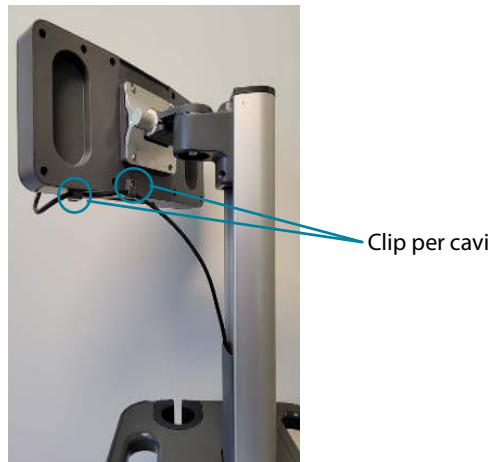

Completare la configurazione dell'Hub

11. Collegare il cavo di alimentazione CA al blocco di alimentazione.



12. Collegare il cavo di alimentazione di AI Station alla presa di corrente. Accendere il dispositivo Kosmos.

13. Una volta completata l'installazione dell'Hub, chiudere il box di alloggiamento dell'Hub con le viti in dotazione. È necessario un cacciavite a croce.




Android e iOS

Installazione del supporto per tablet Android e iOS

È possibile montare facilmente i tablet Android e iOS compatibili su Kosmos AI Station 2 utilizzando il supporto per tablet Android e iOS.

Fare riferimento a questa guida in combinazione con i documenti elencati di seguito.

- *Guida all'installazione di AI Station 2, supporto principale*
- *Guida all'installazione del supporto per tablet Android e iOS*


	Notare che le guide elettroniche per l'utente sono disponibili sul sito web di EchoNous all'indirizzo echonous.com/kosmos-resources/
	Per un elenco dei tablet compatibili, visitare il sito web di EchoNous all'indirizzo echonous.com/product/kosmos-ultraportable-ultrasound/
	Notare che Kosmos Hub è disponibile solo per Kosmos Bridge e Kosmos su iOS.




Installazione del tablet su Kosmos AI Station

Per installare il supporto per tablet Android e iOS sull'AI Station:


1. Fissare la piastra di montaggio del tablet alla piastra di montaggio di AI Station utilizzando la bulloneria in dotazione.

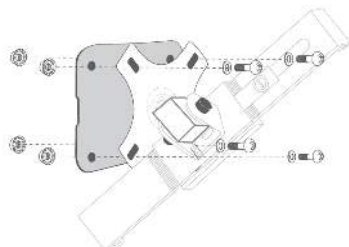


2. Inserire la chiave nell'aletta di bloccaggio per sbloccare il supporto. Tirare indietro lo sportellino e far scorrere l'impugnatura angolare per aprirla.

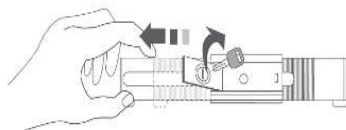



3. Inserire l'angolo del tablet contro l'estremità fissa, far scorrere l'impugnatura dell'angolo opposto verso il basso.

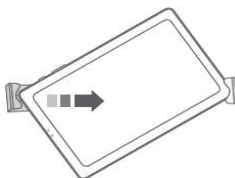

4. Spingere lo sportello di chiusura in dentro e girare la chiave per bloccare il supporto.

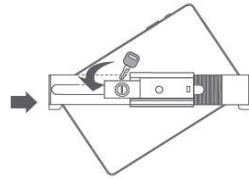

5. Utilizzare la chiave a brugola per ruotare il supporto del tablet nella posizione desiderata.

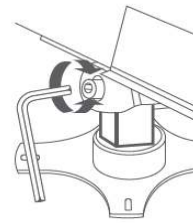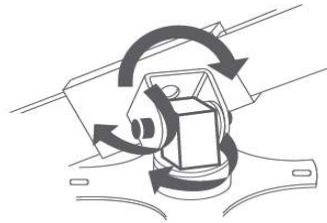





Kosmos su iOS e Kosmos Hub

Installazione e utilizzo di Kosmos Hub con Kosmos su iOS




Notare che non tutte le funzioni sono disponibili in tutti i mercati. Prima dell'uso, fare riferimento alla guida per l'utente valida per la propria area geografica o per il proprio Paese per scoprire tutte le funzioni disponibili.

Mentre si utilizza un tablet iOS sull'AI Station, Kosmos Hub consente di eseguire contemporaneamente la scansione e la ricarica quando Lexsa è collegato, quando Torso-One è collegato o quando sia Lexsa che Torso-One sono collegati.

	Durante la scansione, non scollegare l'alimentazione CA (se attiva).
	Prima dell'uso, Kosmos Hub deve essere collegato e fissato a Kosmos AI Station.
	Il box di alloggiamento dell'Hub non deve essere aperto quando si trova nell'ambiente del paziente.
	Kosmos Hub è disponibile solo per Kosmos Bridge e Kosmos su iOS.


Fissare il box di alloggiamento dell'Hub all'AI Station

1. Fissare il box di alloggiamento dell'Hub, senza l'Hub, all'AI Station con le singole viti a brugola.
 - a. Alla base dell'AI Station, inserire il box di alloggiamento dell'Hub attraverso l'apertura
 - b. Far scorrere l'Hub sul dorso dello stativo.

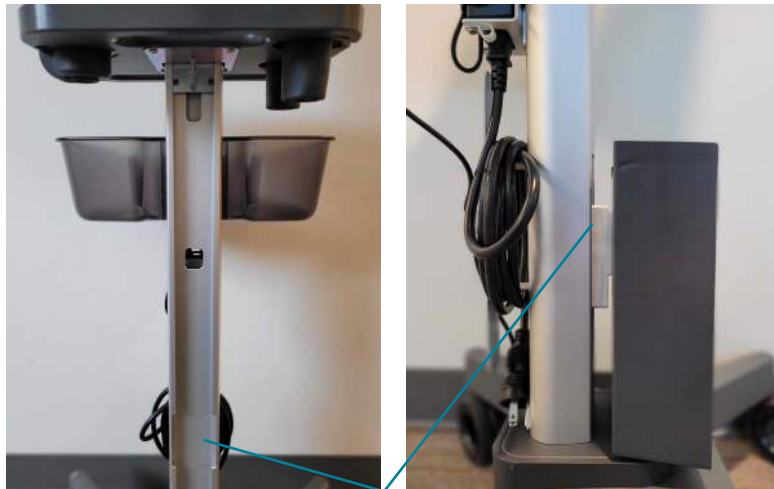

a. Apertura per il supporto del box di alloggiamento dell'Hub

- c. Nella posizione mostrata nell'immagine sottostante, utilizzare la chiave a brugola in dotazione e la singola vite a brugola per fissare l'Hub all'AI Station.

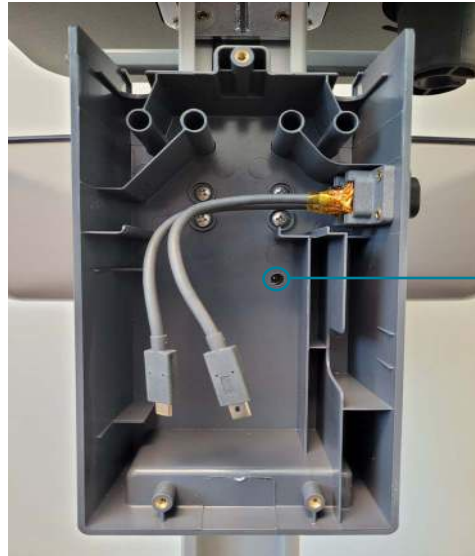


c. Inserire la vite a brugola e serrare con la chiave a brugola fino a bloccare il box di alloggiamento dell'Hub

Collegamento dell'Hub - Vedere l'immagine seguente


2. Prima di inserire l'Hub nel box di alloggiamento dell'Hub, collegare un'estremità del cavo USB-C da tablet a Hub alla porta USB-C dell'Hub.
3. Posizionare l'Hub nel box di alloggiamento dell'Hub. Far passare il cavo USB-C da tablet a Hub attraverso i raccordi e l'apertura del cavo del box dell'alloggiamento dell'Hub.
4. Collegare il cavo di alimentazione dell'Hub alla porta di alimentazione dell'Hub.
5. Far passare il cavo di alimentazione dell'Hub attraverso i raccordi e l'apertura per i cavi del box di alloggiamento dell'Hub.
 - a. Suggerimento: utilizzare lo spazio dietro l'Hub per regolare il cavo attraverso i raccordi.

6. Collegare il cavo di prolunga (USB-C) alle porte USB-C dell'Hub.
7. Collegare Kosmos Lexsa e/o Kosmos Torso-One alle porte esterne del box di alloggiamento dell'Hub.

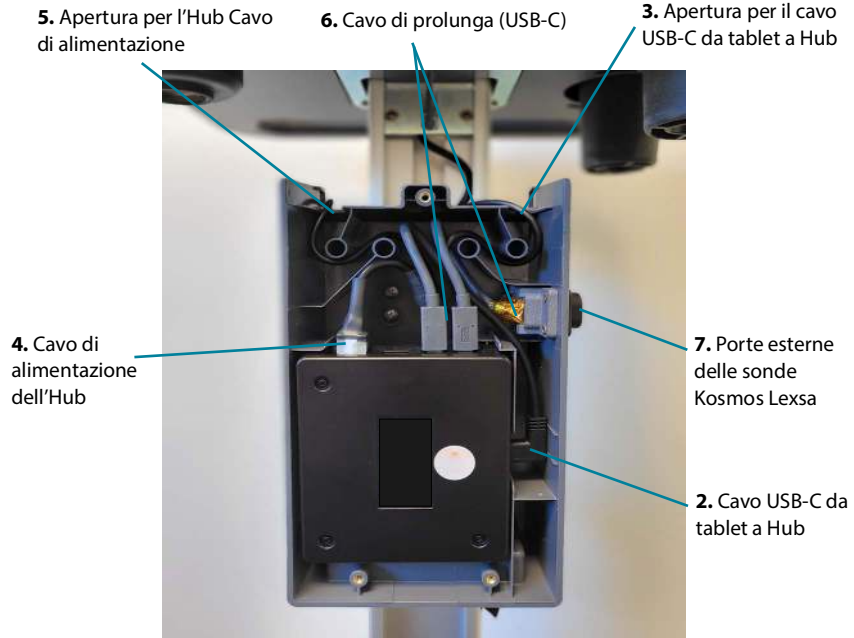

Collegamento dell'Hub al dispositivo iOS e all'alimentatore

8. Far passare l'estremità libera del cavo USB-C da tablet a Hub attraverso il core dell'AI Station e fino al supporto della tablet.

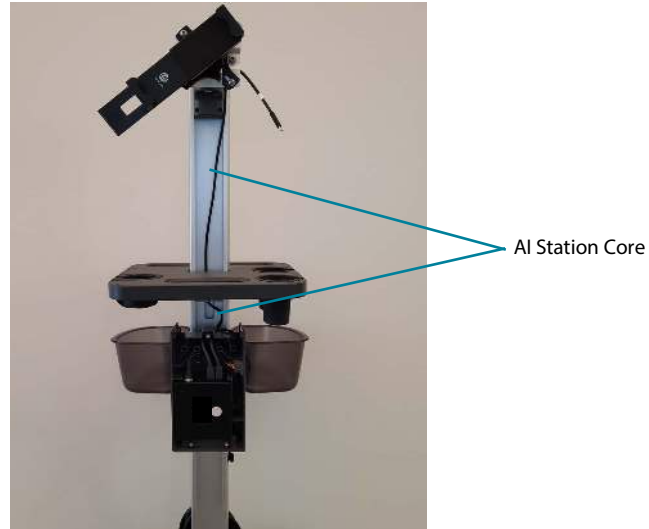

9. Posizionare il dispositivo iOS nel supporto per tablet e collegare il cavo USB-C da tablet a Hub alla porta USB-C del lato del dispositivo iOS.



Completare la configurazione dell'Hub

10. Collegare il cavo di alimentazione CA al blocco di alimentazione.



Blocco di
alimentazione e
collegamento del
cavo di
alimentazione CA

11. Collegare il cavo di alimentazione di AI Station alla presa di corrente.
Accendere il dispositivo Kosmos.

- Una volta completata l'installazione dell'Hub, chiudere il box di alloggiamento dell'Hub con le viti in dotazione. È necessario un cacciavite a croce.




Utilizzo del contenitore di servizio

Il contenitore di servizio può trasportare in sicurezza 4,5 kg.



Non superare il carico utile di sicurezza di AI Station.

- ★ Per rimuovere il contenitore di servizio per la procedura di pulizia, premere la linguetta e far scorrere il contenitore verso l'alto.

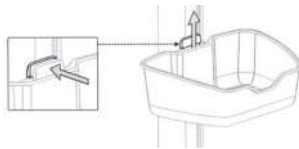

- ★ Per reinstallare il contenitore, allinearne il bordo superiore della staffa di montaggio e far scorrere il contenitore verso il basso fino a quando non scatta in posizione.


Bloccaggio delle rotelle

AI Station dispone di quattro rotelle bloccabili.



AI Station è stato progettato per muoversi liberamente; tuttavia, dopo averlo posizionato nella posizione desiderata, bloccare le rotelle in modo che non si sposti inavvertitamente.

- ★ Per bloccare una rotella, utilizzare il piede per spingere verso il basso la linguetta.

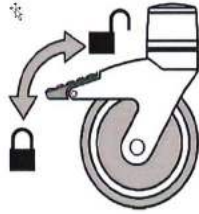

Conservazione del cavo di alimentazione CA

- ★ Per riporre il cavo di alimentazione CA, avvolgere il cavo intorno all'avvolgicavo nella parte inferiore del supporto.

Pulizia e disinfezione

Per la pulizia e la disinfezione di AI Station, consultare le istruzioni del produttore. (https://assets.gcx.com/documents/documents/DU-CLEAN-01_Rev_A.PDF)

Manutenzione ordinaria

Ispezionare periodicamente tutti i dispositivi di fissaggio associati al gruppo di montaggio. Serrare o regolare come necessario per garantire il funzionamento ottimale e la sicurezza.

Pulizia del gruppo di montaggio

Il gruppo di montaggio può essere pulito con la maggior parte delle soluzioni delicate e non abrasive comunemente utilizzate in ambiente ospedaliero (ad esempio, candeggina diluita, ammoniaca o soluzioni alcoliche).

La finitura superficiale viene danneggiata in modo permanente da sostanze chimiche e solventi forti come l'acetone o il tricloroetilene.

Non utilizzare mai lana d'acciaio o altri materiali abrasivi.

I danni causati dall'uso di sostanze o processi non approvati non saranno garantiti. Si consiglia di testare qualsiasi soluzione detergente su una piccola area del gruppo di montaggio non visibile per verificarne la compatibilità.

Non immergere o far penetrare liquidi nel gruppo di montaggio. Eliminare immediatamente i detergenti dal gruppo di montaggio con un panno inumidito d'acqua. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente il gruppo.



GCX non fornisce alcuna indicazione sull'efficacia delle sostanze chimiche o dei processi elencati come mezzo per controllare le infezioni. Consultare il responsabile del controllo delle infezioni o l'epidemiologo dell'ospedale. Per pulire o sterilizzare i dispositivi montati o le apparecchiature accessorie, fare riferimento alle istruzioni specifiche fornite con tali prodotti.

Specifiche

Stativo

- Peso: 24,5 kg
- Dimensioni: 112 x 51 x 45 cm

Kosmos Hub

- Dimensioni: 100 x 116 x 31 mm

Scatola di alloggiamento del mozzo

- Dimensioni: 132 x 237 x 71 mm

Alimentatore

- Ingresso: Alimentazione CA 100-240 V 50-60 Hz
- Uscita: 5,0 V \pm 0,25 V a 2,0 A di corrente massima

Lunghezza del cavo da Hub a tablet

- 1.800 mm (70,9")

Sicurezza

Prima di utilizzare il sistema ecografico, leggere queste informazioni, valide per il dispositivo, i trasduttori e il software. Questa sezione è inerente alle sole informazioni generali sulla sicurezza. Le informazioni sulla sicurezza specifiche per una data attività sono incluse nella procedura corrispondente.

Il sistema Kosmos è considerato un dispositivo medico. Questo dispositivo è destinato all'uso da parte dei soli medici o su prescrizione medica e sotto la supervisione di un medico abilitato e specializzato nel fornire indicazioni per tale attività.



Segnalare a EchoNous e all'autorità competente del Paese in cui si trova l'utente e/o il paziente qualsiasi grave incidente di sicurezza che si verifichi in relazione al sistema ecografico.

Riciclo e smaltimento


EchoNous si impegna a contribuire alla tutela dell'ambiente naturale non solo promuovendo un uso perennemente sicuro ed efficace dei dispositivi, ma anche fornendo informazioni sul corretto smaltimento dei dispositivi al termine della loro vita utile.


L'apparecchiatura può contenere materiali che, se non smaltiti correttamente, costituiscono un rischio per l'ambiente. Quando un dispositivo ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltirlo correttamente seguendo le raccomandazioni riportate di seguito.





Kosmos Bridge contiene batterie agli ioni di litio. Il sistema deve essere, pertanto, smaltito nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali, provinciali, nazionali e/o statali. EchoNous raccomanda di portare qualsiasi apparecchiatura elettronica Kosmos in un centro di riciclaggio specializzato nel riciclaggio e nello smaltimento di apparecchiature elettroniche. Nel caso in cui un componente Kosmos sia stato esposto a materiale biologicamente pericoloso, EchoNous raccomanda di utilizzare contenitori per il rischio biologico in conformità alle normative locali, statali, provinciali e/o nazionali per lo smaltimento. I suddetti componenti Kosmos devono essere portati presso un centro specializzato nello smaltimento di rifiuti a rischio biologico.


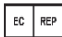

	Al termine della sua vita utile, non incenerire o smaltire il sistema Kosmos con i rifiuti generici. La batteria agli ioni di litio costituisce un potenziale rischio ambientale e di pericolo di incendio.
	La batteria agli ioni di litio contenuta in Kosmos Bridge può esplodere se esposta a temperature eccessive. Non distruggere questa unità incenerendola o bruciandola. Restituire l'unità a EchoNous o al rappresentante locale per lo smaltimento.



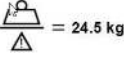

Simboli dell'etichettatura

Simbolo	Descrizione di EchoNous	Titolo SDO Numero di riferimento Standard
	Indica il fabbricante del dispositivo. Include il nome e l'indirizzo del fabbricante	Fabbricante Rif. n. 5.1.1 ISO 15223-1 Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali
REF	Codice articolo o numero di modello	Numero di catalogo Rif. n. 5.1.6 ISO 15223-1 Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali

	<p>Data di fabbricazione</p>	<p>Data di fabbricazione Rif. n. 5.1.3 ISO 15223-1 Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite Parte 1: Requisiti generali</p>
<p>LOT</p>	<p>Codice lotto</p>	<p>Codice lotto Rif. n. 5.1.5 ISO 15223-1 Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali</p>
<p>SN</p>	<p>Numero di serie</p>	<p>Numero di serie Rif. n. 5.1.7 ISO 15223-1 Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite Parte 1: Requisiti generali</p>

	<p>Massa dell'apparecchiatura che comprende il carico utile di sicurezza. Utilizzato secondo IEC 60601-1, Cl. 7.2.21.</p>	<p>Nessuno</p>
	<p>Classificato UL. Apparecchi medicali - Conformità delle apparecchiature di medicina generale relativamente al rischio di folgorazione, incendi e rischi meccanici ai sensi delle norme ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012)/CAN/CSA-C22.2 n. 6060-1 (2008) + (2014). E509516</p>	<p>Nessuno</p>
	<p>Consultare le istruzioni per l'uso</p>	<p>Istruzioni d'uso Rif. n. D.1-11 IEC 60601-1 Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali</p>
	<p>Le precauzioni di sicurezza vengono identificate da questo simbolo sul dispositivo.</p>	<p>Attenzione Rif. n. D.1-10 IEC 60601-1 Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali</p>

	<p>Indica che l'articolo è un dispositivo medico</p>	<p>Rif. n. 5.7.7 ISO 15223-1</p> <p>Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite</p> <p>Parte 1: Requisiti generali</p>
	<p>Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità europea/Unione Europea</p> <p>Nota: Il simbolo è accompagnato dal nome e dall'indirizzo del rappresentante autorizzato.</p>	<p>Rif. n. 5.1.2 ISO 15223-1</p> <p>Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite</p> <p>Parte 1: Requisiti generali</p>
	<p>Marcatura CE</p> <p>Indica la conformità del dispositivo ai requisiti applicabili stabiliti dal regolamento (UE) 2017/745 (MDR) per la marcatura CE e altre normative di armonizzazione dell'Unione applicabili</p>	<p>Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)</p> <p>Articolo 2, (43)</p>

	<p>Indica la corrente continua</p>	<p>Corrente continua Rif. n. D.1-4 IEC 60601-1 Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali</p>
	<p>Non smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti generici o in discarica; fare riferimento alle normative locali per lo smaltimento</p>	<p>Raccolta differenziata Allegato IX Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo</p>
	<p>Mandatario svizzero</p>	<p>Simbolo per mandatario svizzero MU600_00_016e_MB</p>
	<p>Valutazione di conformità del Regno Unito</p>	<p>Simbolo per valutazione di conformità del Regno Unito. MHRA Department of Business, Energy & Industrial Strategy, 31 dicembre, 2020</p>

Recapiti

Stati Uniti



EchoNous Inc.

8310 154th Avenue NE

Building B, Suite 200

Redmond, WA 98052

Supporto tecnico (numero verde): (844) 854 0800

Vendite (numero verde): (844) 854 0800

E-mail: support@EchoNous.com

Sito web: www.EchoNous.com

Spazio economico europeo



Rappresentante autorizzato:

Advena Ltd

Tower Business Centre

2nd Flr, Tower Street

Swatar, BKR 4013

Malta



Mandatario svizzero

CH	REP
----	-----

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610-Wohlen
Svizzera

Responsabile nel Regno Unito

Qserve Group UK, Ltd
49 Greek St, London W1D 4EG,
Regno Unito

Sponsor per l'Australia

LC & Partners Pty Ltd
Level 32, 101 Miller Street
North Sydney, NSW, 2060
Australia
Tel.: + 61 2 9959 2400

Suporte ao cliente da EchoNous

Entre em contato com o suporte ao cliente:

Telefone: 844-854-0800

Fax: 425-242-5553

E-mail: info@echonous.com

Sito: www.echonous.com

Fabricante:

EchoNous, Inc.
8310 154th Ave NE, Edifício B, Suíte 200
Redmond, WA 98052
Estados Unidos da América

País de Origem: Estados Unidos da América

Brazil Authorized Representative

Detentor da Notificação:

VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda

Rua Batataes no 391, conjuntos 11, 12 e 13 - Jardim Paulista
São Paulo - SP - 01423-010
CNPJ: 04.718.143/0001-94
SAC: 0800-7703661
Farm. Resp: Cristiane Ap. de Oliveira Aguirre – CRF/SP: 21.079
Notificação ANVISA no: 80102519147

P006268-002, Rev A
Agosto 2023